

# מד נפח ריאות<sup>®</sup> Minispir

**מיני מעבדה ניידת של ספירומטריה ואוקסימטריה**



1. חבר את ה-**MINISPIR** לכניסת USB של המחשב בו הותקנה התוכנה **Winspiro-Pro**.

2. המכשיר ישמיע צליל.

3. הכניס את הטורבינה בתוך החלק החלול של ה-**MINISPIR**, כשהמדחפים פנימה והפיה כלפי חוץ. שים לב למגרעות. לחץ עד הסוף וסובב לנעילה. אין להפעיל כוח.



**חשוב ! לכל מטופל חדש, יש להשתמש בטורבינה חד פעמית חדשה, מהאריזה המקורית והסגורה. שימוש בטורבינה חד פעמית מבטיחה את דיוק הבדיקה והיגיינה מלאה.**



winspiro PRO

4. לחץ על האייקון של **Winspiro-Pro** להפעלה התוכנה בהמחשב.

**חשוב ! יש לבצע בדיקת תקינות הספירומטר וכיול אחת לשנה. ראה תאריך על גב המדבקה.**

השימוש ב-MINISPIR אמור להתבצע על ידי רופא או טכנאי מוסמך לכך. מידע נוסף זמין באתר [www.rafamedical.co.il](http://www.rafamedical.co.il)

**רפא מדיקל בע"מ**  
טכנולוגיה ויישומים רפואיים  
[www.rafamedical.co.il](http://www.rafamedical.co.il)



כתובת: הירקון 36 יבנה, 8122739. טל: 08-9322-393  
פקס: 08-9322-392 ד"א: info@rafamedical.co.il